

# SW 660 ECG

**swisstone®**

Hergestellt in China

Gebrauchsanweisung



DE


## 1. Übersicht



1. TFT-Monitor
2. Touch-Bereich
3. Uhrarmband
4. EKG-Metallring
5. Ein-/Aus-Taste / Zurück zum Startbildschirm

## 2. Laden des Geräts

Obwohl es sein kann, dass Ihr SW 660 ECG bereits ausreichend geladen bei Ihnen ankommt, empfehlen wir Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal vollständig aufzuladen.

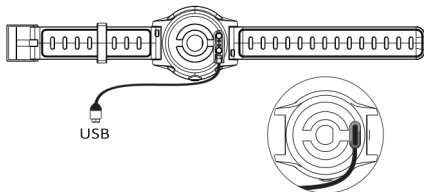

1. Schließen Sie das beiliegende Ladekabel unten an der Uhr an.
2. Stecken Sie den USB-Ladestecker in einen beliebigen USB-Anschluss mit Ladefunktion.
3. Falls erforderlich, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Display zu aktivieren.

**Hinweis!** Maximale Ladeausgangsleistung für USB-Ladegerät: 5 V/1 A. Entfernen Sie immer zuerst das Ladekabel aus dem USB-Eingang, bevor Sie es von der Uhr trennen! Um einen Kurzschluss aufgrund von Metallkontakt (z. B. in Form von Büroklammern etc.) mit dem Ladekabel zu verhindern, lassen Sie das Kabel niemals mit einem USB-Eingang verbunden, wenn es nicht verwendet wird!

**Hinweis!** Im Allgemeinen erfolgt der Ladevorgang schneller, wenn der Stecker direkt in ein USB-Netzteil gesteckt wird, anstatt ihn an anderen Geräten wie Computern anzuschließen.

### 3. Installieren Sie die App auf einem Smartphone oder Tablet

Laden Sie die App **swissFit ECG** von Google Play oder aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.

#### Kompatible Geräte

- Android, Version 4.4 und höher
- iOS, Version 8.2 und höher
- Zu Bluetooth 4.0 und neueren Versionen kompatible Geräte



## 4. Erstellen eines Kontos und eines persönlichen Profils

Öffnen Sie die App **SwissFit ECG**, und erstellen Sie ein Konto bzw. melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Nachdem Sie die Verbindung zum Armband hergestellt haben, geben Sie die Benutzerdaten ein. Klicken Sie dazu in der unteren Statusleiste der App auf **Mein** und **Persönliches Gerät**, und geben Sie im Dialogfenster Ihre Größe, Ihr Gewicht, Ihr Geschlecht sowie die zutreffende Trageweise ein (Tipp: durch Angabe der richtigen Daten können die Daten genauer und effektiver gemessen werden).


The screenshot shows the 'Benutzereinstellungen' (User Settings) screen. At the top, there is a back arrow, the title 'Benutzereinstellungen', and the status bar shows 'No SIM', '16:31', and battery level. Below the title is a profile picture placeholder and the ID 'ID: 1067063694'. A section header 'Benutzereinstellungen' is followed by a list of settings:

Benutzereinstellungen	
Benutzername	Kitty
Höhe	163cm
Gewicht	48kg
Geburtsdag	1991-05-29
Geschlecht	Weiblich
Tragestile	<input checked="" type="radio"/> Rechte <input type="radio"/> Linke
Hautfarbe Auswahl	<input type="checkbox"/>

Below this is a section header 'Sicherheitseinstellung' and a link 'Ändern Sie das Passwort'.


## 5. Pairen des SW 660 ECG mit Ihrem Smartphone

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie die App **SwissFit ECG**, und klicken Sie auf **Gerät verbinden**. Klicken Sie anschließend auf den Namen des Armbands **SW 660 ECG**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App zum Pairing Ihres SW 660 ECG mit Ihrem Smartphone.

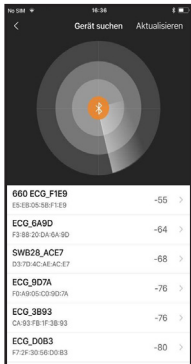

## 6. Synchronisierung des Geräts

Nach dem ersten Pairing synchronisiert das SW 660 ECG die Daten automatisch. Schritte, aktive Kalorien, Wegstrecke, Datum und Uhrzeit werden synchronisiert. Sie können sich die verfügbaren Daten täglich, wöchentlich oder monatlich in der App anzeigen lassen.

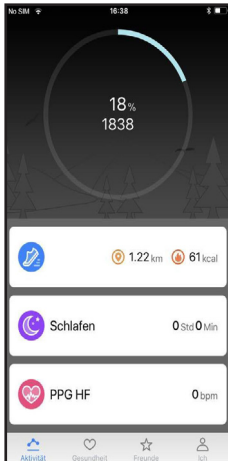

## 7. Die Funktionen des Armbands

Tippen Sie auf den Touch-Bereich des SW 660 ECG, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:

**Hinweis:** Die Steuerung der Fitness-Uhr erfolgt durch Tippen auf den Touch-Bereich (2).

### Uhrzeit und Datum



Zeigt Uhrzeit, Datum und zuletzt gemessenen Schritte, Herzfrequenz und die verbrannten Kalorien an.

### Schritte



Die heute gelaufenen Schritte; zeigen Sie Ihr Ergebnis in der App oder auf dem SW 660 ECG an.

### Wegstrecke



Die heute zurückgelegte Wegstrecke; zeigen Sie Ihr Ergebnis in der App oder auf dem SW 660 ECG an.

### Aktive Kalorien



Die heute verbrauchten Kalorien; zeigen Sie Ihr Ergebnis in der App oder auf dem SW 660 ECG an.

**Hinweis:** Das SW 660 ECG zeigt nicht den Kaloriengrundumsatz an, sondern lediglich die aktiven Kalorien, die durch Bewegung verbrannt wurden. Aus diesem Grund sind diese Werte manchmal deutlich niedriger.

### Schlafmonitor



Überwachen Sie die Dauer und die Qualität Ihres Schlafs in der App oder auf dem SW 660 ECG.



Die Funktion zur Erfassung der Schlafdauer beginnt um 22:00 Uhr. Wenn Sie früher schlafen gehen, wird dies nicht erfasst. Zeiten, in denen Sie am Tag schlafen, werden ebenfalls nicht aufgezeichnet.

### Herzfrequenz



Messen Sie Ihre Herzfrequenz in Echtzeit.  
Die Messung dauert etwa 30 bis 40 Sekunden.

### Blutdruck



Überwachen Sie Ihren Blutdruck in der App oder auf dem SW 660 ECG.

Die Messung dauert etwa 30 bis 40 Sekunden.

### EKG+PPG



Tippen Sie drei Sekunden lang auf den Touch-Bereich, um den Messmodus zu aktivieren, und berühren Sie den Metallring, wie in den Bildschirmanweisungen vorgegeben.

Unabhängig davon, ob Sie eine Offline-Messung oder eine Messung über die App durchführen, halten Sie bitte die korrekte Position ein: ruhig und entspannt. Bei einer Offline-Messung rufen Sie das Display der EKG-Messung auf, und berühren Sie mit den Fingern den Metallring. Daraufhin wird eine Wellenform angezeigt. Nach etwa drei Sekunden wird auf dem Display das Ende nach 30 bis 60 Sekunden angekündigt. Sie können den Verlauf in der App anzeigen und Parameter der Messergebnisse, z. B. die Herzfrequenz, überprüfen. Außerdem können Sie die EKG-Wellenform über die App teilen.



**Hinweis:** Die Sensoren der SW 660 ECG benötigen ein bisschen Feuchtigkeit, damit ein guter Kontakt zwischen Haut und Sensor hergestellt werden

kann. Andernfalls funktioniert die EKG-Messung nicht zuverlässig.

### **Wichtig:**

Die SW 660 ECG ersetzt keinen Arzt.

Herzinfarkte können nicht festgestellt werden. Wenn Schmerzen oder Druck im Brustbereich gespürt werden, alarmieren Sie sofort den Rettungsdienst.

Schlaganfälle oder Blutgerinnsel können mit der SW 660 ECG nicht festgestellt werden.

Auch andere Herzleiden können nicht festgestellt oder diagnostiziert werden.

Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, konsultieren Sie einen Arzt.

## Sportart



Tippen Sie drei Sekunden lang auf den Touch-Bereich, um die Auswahl der Multi-Sport-Modi aufzurufen.

Sie können zwischen den Modi „Laufen“, „Gehen“, „Klettern“ und „Fahrradfahren“ wählen.

Wählen Sie den gewünschten Sport-Modus aus, indem Sie zur jeweiligen Oberfläche wechseln (wählen Sie den gewünschten Modus aus und drücken Sie drei Sekunden lang, um den Sport-Modus aufzurufen; drücken Sie drei Sekunden lang, um den Modus zu verlassen und zur übergeordneten Oberfläche zurückzukehren).

## Timer



Tippen Sie länger auf den Touch-Bereich, um die Funktion aufzurufen; tippen Sie auf den Touch-Bereich, um den Timer zu starten bzw. zu stoppen.

## Informationen



Push-Nachrichten des Mobiltelefons anzeigen. Maximal drei Nachrichten werden gespeichert.

## HINWEIS:

Um SMS-, Anrufs- und App-Benachrichtigungen auf Ihrem SW 660 ECG empfangen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Apps haben im Einstellungsmenü des Mobilgeräts eine Freigabe für Push-Nachrichten.
2. Die Erinnerungen / Benachrichtigungen sind in den Geräteeinstellungen der App SWissFit ECG aktiviert.

Tippen Sie ca. 3 Sekunden auf den Touch-Bereich.

Die erste Nachricht wird mit Name bzw. Nummer des Absenders angezeigt.

4. Tippen Sie erneut auf den Touch-Bereich, um zur nächsten Nachricht zu wechseln.

5. Verlassen Sie die Benachrichtigungen, indem Sie das Funktionsfeld drei Sekunden antippen.

## Telefon finden



Öffnen Sie **Telefon finden** und drücken Sie den Touch-Bereich des SW 660 ECG längere Zeit. Ihr Telefon klingelt oder vibriert, je nach dem ausgewählten Klangprofil. Dadurch können Sie es finden.

## Anzeige



Tippen Sie länger auf den Touch-Bereich, um die gewünschte Anzeige auszuwählen. Drücken Sie dann drei Sekunden lang auf den Touch-Bereich, um die Auswahl zu bestätigen und die Oberfläche zu verlassen.

## System



Diese Oberfläche zeigt die Bluetooth-Nummer und die Softwareversion. Drücken Sie drei Sekunden lang auf den Touch-Bereich, um die Ausschalt-Oberfläche aufzurufen.

Tippen Sie drei Sekunden auf den Touch-Bereich. Wählen Sie die Option **JA** aus, indem Sie kurz auf den Touch-Bereich tippen.


Tippen Sie drei Sekunden auf den Touch-Bereich. Ihre SW 660 ECG wird ausgeschaltet, das Display erlischt.

## 8. Schlafmonitor

Tragen Sie Ihr SW 660 ECG immer, auch nachts, um Ihre Schlafqualität auf Grundlage ihrer nächtlichen Bewegungen zu analysieren und ihren gesamten Schlafzyklus zu überwachen.

Das SW 660 ECG schaltet um 22:00 Uhr in den Schlafmodus.

Am nächsten Tag zeigt sie Ihnen die Dauer Ihres Schlafzyklus an. Sie können sich die verfügbaren Daten täglich, wöchentlich oder monatlich anzeigen lassen.

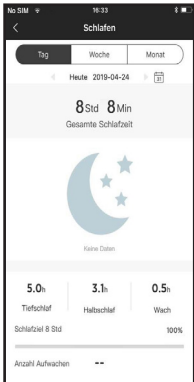

## 9. Erfassung von Herzfrequenz und Blutdruck


Öffnen Sie die App **SwissFit ECG**, und tippen Sie auf **Gesundheit**.

Wenn Sie die Herzfrequenz zum ersten Mal messen, muss diese zunächst kalibriert werden. Tippen

Sie auf **Messungskalibrierung**, um die Kalibrierungsoberfläche aufzurufen. Unterteilen Sie die Blutdruckkalibrierung in Exakte Kalibrierung und Kalibrierung des Blutdruckniveaus. Wenn Sie Ihren Blutdruck kennen, wählen Sie **Exakte Kalibrierung**. Geben Sie Ihren hohen sowie Ihren niedrigen **Blutdruckwert** ein und verlassen Sie das Menü. Wenn Sie Ihre Werte nicht kennen, tippen Sie auf Kalibrierung des **Blutdruckniveaus**, und wählen

Sie das passende **Blutdruckniveau** aus, welches in die Niveaus **Niedrig**, **Flach**, **Normal** und **Hoch** unterteilt ist. Verlassen Sie den Bildschirm, nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben.

Tippen Sie auf **Messung**, um mit dem Messen zu beginnen. Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger 30 bis 60 Sekunden lang auf den Metallring. Nach Abschluss der Messung wird ein Abschlussbericht angezeigt.

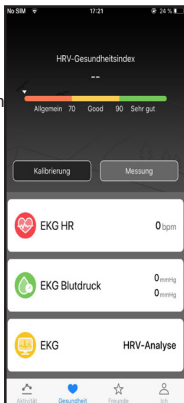


**Hinweis!** Ihr SW 660 ECG ist ein Screening-Gerät, das vorwiegend für eine diagnostische Überprüfung vorgesehen ist. Die überwachten Daten dienen keinen medizinischen Zwecken und sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten oder körperlichen Verfassungen bestimmt. Die optische Überwachung von Herzfrequenz und Blutdruck ist ein wertvolles Werkzeug, um eine ungefähre Einschätzung der Herzfrequenz des Benutzers zu einem beliebigen Zeitpunkt zu erhalten. Die gemessene Herzfrequenz schwankt abhängig vom Verhalten und Aktivitätsgrad des Benutzers. Verschiedenste technische Einschränkungen können dazu führen, dass die Herzfrequenzüberwachung unter bestimmten Umständen ungenau ist. Zu diesen Umständen können die körperlichen Eigenschaften des Benutzers, die Passform des Gerätes sowie die Art und Intensität der Aktivität gehören. Die Genauigkeit der Herzfrequenz-Messwerte ist beim Schwimmen sehr begrenzt; deshalb raten wir von der Überwachung der Herzfrequenz beim Schwimmen ab.

## 10. Benachrichtigung über Anrufe und Nachrichten


Tippen Sie auf **Geräteeinstellungen** und dann auf **Weitere Erinnerungen**.

Wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die auf dem SW 660 ECG angezeigt werden sollen.

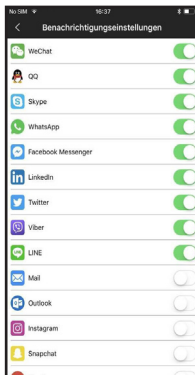

## 11. Erinnerungen

Wählen Sie in den Geräteeinstellungen „**Weitere Erinnerungen**“ aus um **Medizin einnehmen**, **Besprechung**, **Inaktivität** oder **Trinken-Erinnerung** zu aktivieren. Sie können auf die einzelnen Funktionen tippen, um festzulegen, zu welchen Zeiten Sie die Erinnerungen erhalten möchten.

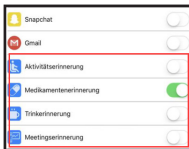



### Erinnerung zum Einnehmen von Medikamenten:

Sie können verschiedene Zeitintervalle auswählen: vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden und zwölf Stunden. Wählen Sie die gewünschte Anfangs- und Endzeit aus, und sichern Sie die Eingaben. Sie werden automatisch Erinnerungen über Ihr SW 660 ECG erhalten.

### Erinnerung an Besprechungen:

Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit der Besprechung sowie die gewünschte Anfangs- und Endzeit aus, und sichern Sie Ihre Eingaben. Sie werden automatisch

Erinnerungen über Ihr SW 660 ECG erhalten.

### Erinnerung bei Inaktivität:



Sie können verschiedene Zeitintervalle auswählen: eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und vier Stunden. Wählen Sie die gewünschte Anfangs- und Endzeit aus, und sichern Sie Ihre Eingaben. Sie werden automatisch Erinnerungen über Ihr SW 660 ECG erhalten.

### Erinnerung, etwas zu trinken:

Sie können verschiedene Zeitintervalle auswählen: eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und vier Stunden. Wählen Sie die gewünschte Anfangs- und Endzeit aus, und sichern Sie Ihre Eingaben. Sie werden automatisch Erinnerungen über Ihr SW 660 ECG erhalten.

## 12. Weckalarm

Der Alarm kann einmal oder immer wieder ertönen. Sie können bis zu fünf unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

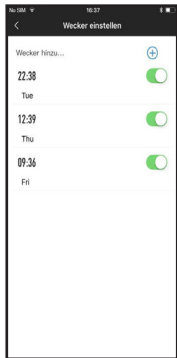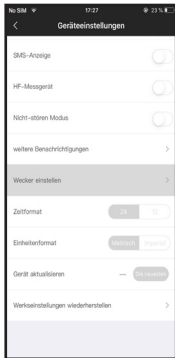

## 13. Betriebshandbuch

Tippen Sie auf **Mein** und wählen Sie dann **Betriebshandbuch**. Daraufhin werden die App-Version, Anweisungen und Antworten auf die häufigsten Fragen zur App, einschließlich dem Einrichten und Verwenden weiterer Funktionen, angezeigt.

Wählen Sie **Feedback**, um uns Vorschläge und Feedback zu schicken, anhand derer/dessen wir das Produkt verbessern können.



## 14. Aktualisierung der Armband-Firmware

Wählen Sie **Mein, Geräteeinstellungen** und dann **Firmware-Update**, um den Status der derzeitigen Firmware und die aktuelle Firmware-Version anzuzeigen. Ist eine Aktualisierung verfügbar, wählen Sie **AKTUALISIEREN**, um die neueste Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren.

## 15. Werkseinstellungen wiederherstellen

Löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem Fitness-Armband, indem Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

1. Rufen Sie den Benutzer-Tab **Mein** auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Geräteeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät zurücksetzen**.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **BESTÄTIGEN/bestätigen** tippen. Ihr SW 660 ECG wird zurückgesetzt.

***Hinweis:** Sofern das Fitness-Armband nicht aus der App entfernt wird, werden nach kurzer Zeit wieder die Einstellungen der App übernommen (Uhrzeit, etc.).*

***Hinweis:** Bevor Sie Ihr Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:*

- Löschen Sie alle Daten vom Gerät durch das Zurücksetzen.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

## 16. Sicherheitshinweise

### Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, für den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, für Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

### Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

---

#### WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

---

### Flugmodus

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Bluetooth-Geräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

### Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen/Sprays in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungslösungen, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthalten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Öffnungen eindringen.

## Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn das Gerät sich wieder auf die Normaltemperatur aufwärmt, kann innerhalb des Geräts Kondensation auftreten, wodurch die elektronischen Schaltungen beschädigt werden können.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stoßen oder schütteln Sie das Gerät nicht. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör.

Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

## Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts



Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte  
(WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, sodass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

## Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt



(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, dass das Funkgerät Swisstone SW 660 ECG den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EG (RoHS). Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.swisstone.de](http://www.swisstone.de).

## Gewährleistung

Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Geräts Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: [www.swisstone.de](http://www.swisstone.de)

Wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation, Software-Downloads usw.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Gewährleistung nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht wurden. In diesen Fällen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Kosten für Ersatz oder Reparatur dem Kunden in Rechnung zu stellen. Für Verschleißteile wie Akku oder Gehäuse gilt eine beschränkte Gewährleistung von 6 Monaten. Bedienungsanleitungen und ggf. mitgelieferte Software sind von dieser Gewährleistung ausgenommen. Weitere bzw. andere Ansprüche in Verbindung mit evtl. Gewährleistungsansprüchen des Herstellers sind ausgeschlossen. Somit besteht kein Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch für Geschäftsunterbrechungen, Gewinn- und/oder Datenverluste sowie für zusätzlich vom Benutzer installierte Software und/oder andere Informationen. Der Kaufbeleg mit Kaufdatum ist der Gewährleistungsnachweis.

## Technische Daten

<b>Bluetooth-Version</b>	4.2
<b>Frequenzbereich</b>	2402–2480 MHz
<b>Max. Bluetooth-Ausgangsleistung</b>	10 mW (dBm)
<b>Maße</b>	Durchmesser: 5 cm Höhe: 1,2 cm
<b>Display</b>	240×240 Pixel, 1,3" TFT
<b>Wasserdicht</b>	IP67
<b>Gewicht</b>	40 g
<b>Akku</b>	230 mAh Lithium-Ionen-Batterie
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 50 °C

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© IVS GmbH 2019 • Alle Rechte vorbehalten

Manual\_SW\_660\_ECG\_de\_70x95\_v31

